



КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВЫ

ПРОТОКОЛ:

HEAD BRAIN+BONE

ПРОТОКОЛ СКАНИРОВАНИЯ:

Обследование проводится путем спирального сканирования в одну фазу без применения рентгеноконтрастного препарата и в две фазы с применением рентгеноконтрастных препаратов. К столу томографа подсоединяется специальный подголовник.

Параметры протокола:

Scan Slice Thickness 0,5 mm

kV 120

mA 280

Rotation Time 0,75s

Recon #1 ax 3x1,5 mm, brain

Recon #2 ax 1x0,5 mm, bone

ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Взрослые - 5 минут

Дети - 10 минут

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- КТ 256 срезов
- КТ 320 срезов
- КТ 80 срезов
- КТ 64 среза